

Plaie profonde / Fistule

Prescrire → Sorbact psmt absorbant® (10x10 ou 10x20)

Positionner le pansement contre les parois de la cavité

Pour les cavités de petite taille ou les fistules

- Désolidariser le tulle vert du pansement
- Découper une ou des mèches dans le tulle
- Combler sans tasser la cavité avec une bande de tulle vert
- Pansement secondaire
 - Plaie  → super absorbant
 - Plaie  → psmt américain ou Hydro-cellulaire ou les pansements « blancs » du pansement Sorbact



Plaie superficielle

Plaie  → Sorbact Super absorbant®

Plaie  → Sorbact psmt absorbant®



Plaie

Plaie superficielle

- Protéger la peau péri lésionnelle
- Recouvrir la plaie avec Sorbact Hydrogel® sans déborder
- Psmt secondaire → compresses

Plaie profonde ou fistule

- Protéger la peu péri lésionnelle
- Combler sans tasser avec Sorbact Hydrogel® et sans déborder
- Psmt secondaire → compresses ou hydrocellulaire siliconé

