

Fibres à Haut Pouvoir d'Absorption

- Fibre de CMC (Carboxy Methyl Cellulose)
- Propriétés
 - Absorption « verticale » des exsudats
 - Gelification au contact des exsudats

Indications

- Plaies aiguës et chroniques très exsudatives sans distinction de phase

Contre-indication

- Allergie connue aux hydrocolloïde
- Plaie non exsudatives



Aquacel extra Compresse	Taille	Boitage	Code ACL	Remboursé LPPR
	5x10	16	34010441258271	Oui
	12.5x12.5	16	34010441258332	Oui
	13.5x15	16	34010441258561	Oui
	18x23	10	34010441258622	Oui

Aquacel extra Mèche	Taille	Boitage	Code ACL	Remboursé LPPR
	4x30	10	34010441258103	Oui
	4x20 (Hôpital et HAD)	10	34010441258042	Oui

Mode d'utilisation

Lavage de la plaie eau + savon

Soins de la peau péri lésionnelle (PPL)

- PPL normale sèche → émollient
- PPL irritée / eczématisée → dermocorticoïdes

Plaie superficielle

- Compresse d'Aquacel extra® directement sur la plaie
- Laisser déborder en PPL → protection

Plaie profonde

- Mécher la cavité ou les zones de décollement
- Avec la forme mèche ou avec la compresse

Pansement secondaire

- Plaie  → Psmt Super Absorbant
- Plaie  → Psmt américain ou Aquacel foam®

Conseils pratiques

- Ne pas humidifier

