

EscarProtect

- Est **non irritant** pour la peau et les muqueuses, **non allergisant**. Il est **biocompatible**.
- Est un dispositif médical qui ne contient **pas de principe actif** au sens pharmacologique du terme.

ABSENCE D'EFFICACITÉ

- Positionnement du produit sur peau non sèche.
Une peau humide est un frein à la pénétration du produit.
- Positionnement du produit sur peau non propre.
Une substance indésirable présente à la surface de la peau peut être entraînée par le produit dans l'épiderme (effet drainant) d'où possible aggravation des troubles.
- Lavage de peau immédiatement après étalement du produit.
Le réseau intra-épidermique n'a pas eu le temps de se positionner.
- Positionnement du produit insuffisant.
Une seule fois par jour, irrégulièrement, sur trop courte durée (2 ou 3 jours), interruptions, abandon.
- **EscarProtect** peut provoquer des rougeurs révélant une pathologie sous-jacente qu'**EscarProtect** ne traite pas (bactéries, toxine...).
- Malgré toutes les précautions, il se peut que dans quelques cas **EscarProtect** ne donne pas les résultats escomptés...

COMPOSANTS: Aqua, Mhevozyx®, Butane (and) propane, Diméthicone. TEA, Polysorbate 20. (Sans parfum et sans conservateur)

EscarProtect.fr

60 ml
EAN: 3 401060 08365 6



8 rue des Roses
51140 Jonchery sur Vesle



09 72 63 09 05



Tout spray entamé peut être
utilisé sans risque jusqu'à la
date de péremption

www.metanoiasante.com



EscarProtect



Escarres, prévention des risques

Protection péri-lésionnelle

Dermite associée à l'incontinence

Prévention et soin

Protection sous les pansements



Metanoïa Santé

PROPRIÉTÉS

- Constitue un réseau intra-épidermique non perceptible, non occlusif, non filmogène, non gras.
- Résiste à des lavages répétés.
- Durée d'action, de 3 à 7 heures en fonction de l'état de la peau.
- N'empêche pas l'adhésion des pansements (après pénétration du produit).
- Un usage à long terme ne présente aucun inconvénient.

PEAUX CONCERNÉES

- Utilisable sur toute la surface corporelle, y compris le visage.
- Peaux saines à très réactives du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte.
- **Soin sur peaux altérées ou lésées.**


SPÉCIFICITÉ D'ACTION

- Doux par son aspect, par sa galénique, par son innocuité. **EscarProtect** agit avec le temps et dans le temps, respectant le cycle naturel de la peau.
- N'entrave pas le fonctionnement normal de la peau.
- Renforce la résistance de l'épiderme aux agressions chimiques, physiques et biologiques.

INDICATIONS


- Protection des zones à risque d'escarre: talons, sacrum, ...
- Prévention et soin des dermites associées à l'incontinence (DAI), de forme légère à sévère.
- Protection des zones exposées à la macération et aux pansements.
- Préserve les berges de la plaie, la peau péristomiale ou la peau péri-lésionnelle.

MODE D'ACTION

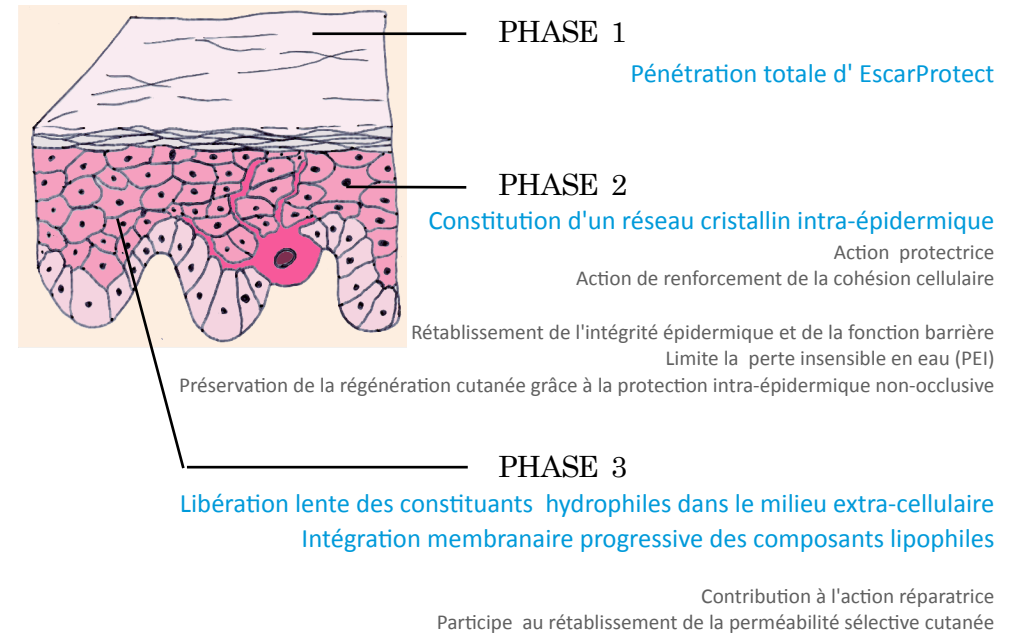

MODE D'EMPLOI

- **Appliquer sur peau propre et sèche.**
- **A raison de une à trois applications par jour.**
- Tenir le spray tête en bas et extraire une noisette de mousse en appuyant légèrement sur le diffuseur.
- Appliquer sur la zone à traiter, faire pénétrer doucement jusqu'à disparition du produit (rapide).
- Si la zone est sensible ou abîmée, tapoter avec la boule pour déposer un peu de produit, attendre quelques instants, faire pénétrer doucement le reste du produit.

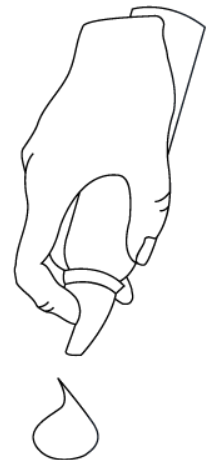

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions sur l'étiquette. Respecter les précautions d'emploi. En cas de doute, consultez votre médecin spécialiste.